

Conjunto de Calibradores para TEOFILINA

Conjunto de Calibradores para testes de determinação quantitativa imunológica da Teofilina em soro humano.

Nº de lote, data de fabricação e validade: vide rótulos dos frascos e do estojo.

Artigo

TEO/STS-6X1

Apresentação

6 x 1 mL
(6 níveis de 1 mL cada)

Uso Previsto

Preparação de curvas de calibração para determinação quantitativa imunológica da Teofilina em soro humano.

Composição

Os calibradores são diluições de Teofilina em fosfato tamponado salino.
Conservante: 0.095% de Azida Sódica.

Preparo e Estabilidade

Preparo

Os calibradores estão prontos para uso.

Estabilidade e Armazenagem

A data de validade do produto à 2 – 8 °C está indicada no rótulo.
Após abrirem os frascos pela primeira vez, os calibradores podem ser usados em pelo menos 6 semanas se armazenados bem fechados à 2 – 8 °C após o uso
Não congelar!

Precauções e Avisos

1. Somente para uso em diagnóstico *in vitro*.
2. Reagentes contendo Azida Sódica devem ser manipulados com o devido cuidado: Não ingerir e não deixar entrar em contato com a pele e membranas de mucosas! A Azida Sódica pode formar azidas explosivas quando em contato com metais pesados como o chumbo ou cobre.

Garantia

Estas instruções de uso devem ser lidas atentamente antes da utilização do produto e as instruções nela contidas devem ser rigorosamente cumpridas. A confiabilidade dos resultados do ensaio não poderá ser garantida em caso de desvio às instruções.

Descarte

Seguir as disposições da resolução locais sobre o regulamento técnico para gerenciamento de resíduos de serviços de saúde bem como outras práticas de biossegurança equivalentes, revisão em vigor.

Valores Atribuídos

Lote S0008	Nível 1 (µg/mL)	Nível 2 (µg/mL)	Nível 3 (µg/mL)	Nível 4 (µg/mL)	Nível 5 (µg/mL)	Nível 6 (µg/mL)
Teofilina	0.0	2.64	5.13	9.92	19.54	38.74