

Conjunto de Calibradores para ÁCIDO VALPRÓICO

Conjunto de Calibradores para testes de determinação quantitativa imunológica do Ácido Valpróico em soro humano.

Nº de lote, data de fabricação e validade: vide rótulos dos frascos e do estojo.

Artigo

VAL/STS-6X1

Apresentação

6 x 1 mL
(6 níveis de 1 mL cada)

Uso Previsto

Preparação de curvas de calibração para determinação quantitativa imunológica do Ácido Valpróico em soro humano.

Composição

Os calibradores são diluições de Ácido Valpróico em soro humano normal.

Conservante: 0.095% de Azida Sódica.

Preparo e Estabilidade

Preparo

Os calibradores estão prontos para uso.

Estabilidade e Armazenagem

A data de validade do produto à 2 – 8 °C está indicada no rótulo.

Após abrirem os frascos pela primeira vez, os calibradores podem ser usados em pelo menos 6 semanas se armazenados bem fechados à 2 – 8 °C após o uso.

Não congelar!

Precauções e Avisos

1. Somente para uso em diagnóstico *in vitro*.
2. Cada doador individual usado para a produção do soro controle de proteína foi testado para antígeno de superfície de hepatite B (HBsAg), vírus anti-hepatite C (anti-HCV) e anti-HIV1 e HIV2 pelo teste requisitado pela FDA. Somente as doações de amostras negativas foram usadas para a produção. Entretanto, todo produto obtido a partir de fluidos corporais humanos devem ser manipulados com muito cuidado de acordo com os procedimentos recomendados para materiais de risco biológico desde que a ausência de agentes infecciosos não seja provada.
3. Reagentes contendo Azida Sódica devem ser manipulados com o devido cuidado: Não ingerir e não deixar entrar em contato com a pele e membranas de mucosas! A Azida Sódica pode formar azidas explosivas quando em contato com metais pesados como o chumbo ou cobre.

Garantia

Estas instruções de uso devem ser lidas atentamente antes da utilização do produto e as instruções nela contidas devem ser rigorosamente cumpridas. A confiabilidade dos resultados do ensaio não poderá ser garantida em caso de desvio às instruções.

Descarte

Seguir as disposições da resolução locais sobre o regulamento técnico para gerenciamento de resíduos de serviços de saúde bem como outras práticas de biossegurança equivalentes, revisão em vigor.

Valores Atribuídos

Lote S0014	Nível 1 (µg/mL)	Nível 2 (µg/mL)	Nível 3 (µg/mL)	Nível 4 (µg/mL)	Nível 5 (µg/mL)	Nível 6 (µg/mL)
Ácido Valpróico	0.00	12.5	25.0	50.0	100.0	150.0