

Internal Standard Mix - MassTox® Antimycotic Drugs

Padrão Interno para drogas antimicóticas

MS 10350840346

Somente para diagnóstico de uso *in vitro*.

Nº de lote, data de fabricação e validade: ver rótulos dos frascos e da embalagem.

Artigo	Apresentação
92644	3.8 ml

Condições de Armazenamento

Quando armazenado abaixo de -18°C, o padrão interno fechado é estável até a data de validade determinada no rótulo do frasco.

Comentários

A tabela a seguir contém as transições de massas recomendadas para os padrões internos e seus analitos correspondentes. Todas as especificações são aplicadas ao modo de ionização positivo com ionização por electrospray (ESI).

Especificações

Variações de $\pm 1\%$ no peso de cada frasco.

Garantia

Estas instruções de uso devem ser lidas atentamente antes da utilização do produto e as instruções nela contidas devem ser rigorosamente cumpridas. A confiabilidade dos resultados do ensaio não poderá ser garantida em caso de desvio às instruções.

Descarte

Seguir as disposições da resolução sobre o regulamento técnico para gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, bem como outras práticas de biossegurança equivalentes, revisão em vigor.

Transições de Massas

Padrão interno	Transições de massas	Padrões internos para os seguintes analitos
ISTD1	133 > 115	5-Flucitosina
ISTD2	311 > 223	Fluconazol
ISTD3	353 > 284	Voriconazol
ISTD4	539 > 497	Cetoconazol
ISTD5	706 > 617	Posaconazol, Caspofungina
ISTD6	714 > 401	Itraconazol
ISTD7	729 > 400	Hidróxi-itraconazol

Símbolos Usados



Chromsystems Instruments & Chemicals GmbH
 Am Haag 12 - 82166 Gräfelfing/Altenmünch
 Phone: +49 89 18930-0 - Fax: +49 89 18930-199
 mailbox@chromsystems.com - www.chromsystems.com

Importado e Distribuído por: Biosys Ltd.
 Coronel Gomes Machado, 358, Centro, Niterói, RJ
 CEP: 24020-112 - CNPJ: 02220795/000179 - SAC: (21) 3907-2534
 soc@biosys.com.br - www.biosys.com.br