

Internal Standard Mix - MassTox® Benzodiazepines

Padrão Interno para drogas benzodiazepínicas

MS 10350840351

Somente para diagnóstico de uso *in vitro*.

Nº de lote, data de fabricação e validade: ver rótulos dos frascos e da embalagem.

Artigo	Apresentação
92346	3.8 ml

Condições de Armazenamento

Quando armazenado abaixo de -18°C, o padrão interno fechado é estável até a data de validade determinada no rótulo do frasco.

Comentários

A tabela a seguir contém as transições de massas recomendadas para os padrões internos e seus analitos correspondentes. Todas as especificações são aplicadas ao modo de ionização positivo com ionização por electrospray (ESI).

Especificações

Variações de $\pm 1\%$ no peso de cada frasco.

Garantia

Estas instruções de uso devem ser lidas atentamente antes da utilização do produto e as instruções nela contidas devem ser rigorosamente cumpridas. A confiabilidade dos resultados do ensaio não poderá ser garantida em caso de desvio às instruções.

Descarte

Seguir as disposições da resolução sobre o regulamento técnico para gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, bem como outras práticas de biossegurança equivalentes, revisão em vigor.

Transições de Massas

Padrão interno	Transições de massas	Padrões internos para os seguintes analitos
ISTD1	306 > 260	Midazolam, 1-OH-Midazolam, Temazepam
ISTD2	276 > 213	Clobazam, Medazepam, Npr Diazepam, Prazepam
ISTD3	292 > 246	Clordiazepóxido, demoxepam, Diazepam, norclobazam, oxazepam, tetrazepam
ISTD4	347 > 312	Alprazolam, flunitrazepam, flurazepam, lormetazepam, triazolam
ISTD5	327 > 281	Bromazepam, clonazepam, desalquil flurazepam, lorazepam, nitrazepam

Símbolos Usados

	Fabricante
	Limites de temperatura
	Diagnóstico in vitro
	Cuidado, consulte documentos anexos
	Consulte instruções de uso
	Material Reciclável
	Não rejeitar diretamente para o ambiente
	Lote
	Data de Fabricação
	Validade
	Risco Biológico
	Altamente tóxico
	Corrosivo
	Nocivo



Chromsystems Instruments & Chemicals GmbH
 Am Hong 12 · 82166 Gröbbling / Almenhof
 Phone: +49 89 18930-0 · Fax: +49 89 18930-199
 mailbox@chromsystems.com · www.chromsystems.com

Importado e Distribuído por: Biosys Ltd.
 Coronel Gomes Machado, 358, Centro, Niterói, RJ
 CEP: 24020-112 - CNPJ: 02220795/000179 - SAC: (21) 3907-2534
 src@biosys.com.br · www.biosys.com.br